



Handleiding voor gebruikers



Evacusafe™

INHOUD

- Algemene informatie
- Gebruiksaanwijzing voor het materiaal
- Informatie m.b.t. onderhoud en garantie

ALGEMENE INFORMATIE

Als u niet voor de gecertificeerde cursus heeft gekozen dan zijn er wat extra punten om in acht te nemen:

- Wie gaat het materiaal gebruiken
- Waar wordt het materiaal geplaatst?
- Waar is de dichtstbijzijnde geschikte nooduitgang?
- Hebben we genoeg materiaal om alle situaties het hoofd te kunnen bieden?

Mocht u in de toekomst een cursus nodig hebben, bezoek dan: www.evacusafe.nl

Evacusafe biedt één jaar garantie (rupsbanden vijf jaar) op het materiaal vanaf de dag van aankoop. Onderdelen die onderhevig zijn aan algemene slijtage vallen onder de garantie; schade als gevolg van vandalisme of misbruik wordt niet gedekt door de garantie. Materiaal van Evacusafe wordt dusdanig ontworpen dat minimaal onderhoud vereist is. De producten dienen echter wel regelmatig te worden gecontroleerd en onderhouden om de levensduur te verlengen.

ONDERHOUD

Visuele controles die dienen te worden uitgevoerd:

- Zitten alle moeren en bouten vast?
- Werken veiligheidsgordels/ondersteuningstuig goed?
- Openen, sluiten en vergrendelen de vergrendelingsmechanismen eenvoudig?
- Gaan de rupsbandmechanismen soepel open?
- Draaien de rubberen banden soepel rond de geleiders?

ALS ER GROTE GEBREKEN WORDEN ONTDEKT, DAN DIENT DE UITRUSTING BUITEN DIENST TE WORDEN GENOMEN EN DIENT EVACUSAFE TE WORDEN BENADERD VIA TELEFOONNUMMER

 +31 50 311 60 85

Vergelijkingstabel


	Excel evacuatiestoel	Standard evacuatiestoel	Transportstoel
Door één persoon te bedienen	✓	✓	
Veiligheidsremmen	✓	✓	
Lichtgewicht	✓	✓	✓
Comfortabele zitting	✓	✓	✓
Minimaal manueel tilwerk	✓	✓	
Gebruik van 4 wielen op grondniveau	✓	✓	✓
Eenvoudige installatie en gebruik	✓	✓	✓
Armleningen	✓	✓	
Verstelbare zitting- en hoofdsteun	✓	✓	
Veiligheidsriem voor de borst	✓		
Heupgordel	✓	✓	✓
Beensteunriem	✓		
Rupsbanden	✓	✓	
Rood-gecodeerde vergrendelingsmechanismen	✓		
Handgrepen	✓		✓
Stofhoes	✓	✓	✓
Haken en informatieborden	✓	✓	✓
Cursuspakketten beschikbaar	✓	✓	✓

Specificaties evacuatiestoelen

	Excel evacuatiestoel	Standard evacuatiestoel	Transportstoel
Ingeklapt in cm			
Hoogte	113	112	83
Diepte	29	15	26
Breedte	65	54	52
Uitgeklapt in cm			
Hoogte	143	146	93
Diepte	99	70	92
Breedte	65	54	52
Meer specificaties			
Gewicht stoel kg	13.8	12.5	9.6
Maximale draaglast kg	182	150	110

Instructies voor muurbevestiging

	Excel evacuatiestoel	Standard evacuatiestoel	Transportstoel
A - Hoogte vanaf de vloer (cm)	70	80	80
B - Afstand tussen de gaten (cm)	26,5	26	25
C - Dimensie van gat (cm)	0,7	0,7	0,7
D - Gesuggereerde gatdiepte (cm)	5,5	5,5	5,5

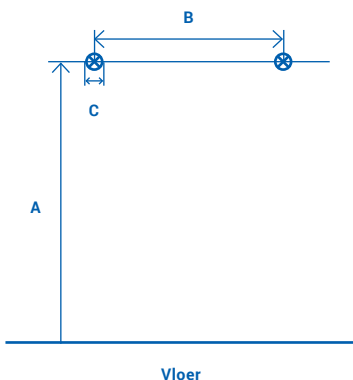

NB: meegeleverde pluggen dienen alleen in stevige, stenen muren te worden gebruikt. Voor holle muren worden speciale pluggen geadviseerd. Zowel de Standard als de Excel stoel dienen aan de dwarsstang tussen de rupsbanden te worden opgehangen (dus niet aan de handgreep). Dit zorgt ervoor dat de beschermhoes goed over de stoel past.

Excel evacuatiestoel

Instructies voor gebruik:



1. De stoel dient te worden geplaatst nabij de uitgang waar hij wordt gebruikt. Hij dient aan de bijgeleverde haken te worden gehangen of hij kan tegen de muur steunen.



2. Verwijder de beschermhoes en plaats de stoel op de grond in een geschikte stand.



3. Schakel het remmechanisme in door op het afgebeelde rode voetgedeelte te drukken.



4. Ontgrendel de steunriem en open de stoel tot een zitstand. Dit activeert het rupsbandmechanisme. Vergrendel door op het pedaal met de twee rode vergrendelingen te drukken.



5. Klap de voetsteun uit.



6. Plaats de evacuë in de stoel, maak de veiligheidsriem vast en duw armleuningen naar beneden.



7. Als de evacuë in de stoel zit, ontgrendel dan het remmechanisme door uw voet bovenop het rode voetgedeelte te plaatsen en dit in te drukken.



8. Begeef u naar de nooduitgang met uw handen in de duwstand op de handgreep.



9. Open, eenmaal in positie, de twee rode veerklemmen. Hierdoor kan de handgreep omhoog. Sluit de twee rode veerklemmen nadat u de handgreep naar boven hebt gebracht en zorg dat ze weer goed zijn vergrendeld. Dit zorgt dat de handgreep is vergrendeld.



10. Plaats uw handen vanuit de duwstand aan de zijkanten naar het bovenste gedeelte van de handgreep. Plaats uw voet op de groene montagegastang van de rupsband en hef de stoel naar achteren.



11. Manoeuvreer de stoel naar voren op de bovenste twee treden. Zorg dat de rupsbanden contact blijven maken met de traptreden.



12. Om de stoel te laten dalen duwt u de handgreep richting uw voeten. Dit zorgt voor een soepele, gecontroleerde afdaling.



13. Zodra u een overloop bereikt, bedient u de stoel weer met 4 wielen en beweegt u de stoel naar de volgende trap. Wanneer u de begane grond hebt bereikt, rijdt u naar de uitgang.

TERUG NAAR DE OPBERGSTAND



14. Zorg dat het remmechanisme vergrendeld is.



15. Ontgrendel de rode veerklampen op de handgreep en beweeg rustig naar beneden. Sluit de rode veerklampen en haal de handgreep naar boven totdat deze vergrendelt. Haal het ondersteuningsharnas door en over de handgreep.



16. Klap de armleuningen naar achteren en sluit de stoel van de zijkant door het remmechanisme op de rupsband te ontgrendelen, naar voren te duwen vanaf de bovenste handgreep en de stoel dicht te klappen.



17. Haal het onderste gedeelte van het ondersteuningsharnas door de voetsteun en verbind dit met het bovenste gedeelte. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en doe de beschermhoes er weer op.

Standard evacuatiestoel

Instructies voor gebruik:



1. De stoel dient te worden geplaatst nabij de uitgang waar hij wordt gebruikt. Hij dient aan de bijgeleverde haken te worden gehangen of hij kan tegen de muur steunen.



2. Haal de stoel van de muur en plaats op de grond. Activeer de voetremmen door op de voetpedalen te drukken.



3. Ontgrendel de veerklemmen op de handgreep, schuif naar beneden, sluit de klemmen en haal omhoog om te vergrendelen.



4. Houd de bovenkant van de stoel vast terwijl u de zitting naar beneden trekt. Als de stoel eenmaal open is, haalt u de twee armleuningen naar beneden. De armleuningen kunnen geen gewicht dragen.



5. Open de twee veerklemmen. Hierdoor kan de bovenste handgreep worden verhoogd.



6. Sluit de veerklemmen en zorg dat ze weer zijn vergrendeld. Hierdoor wordt tevens de handgreep vergrendeld.



7. Open de twee veerklemmen aan de achterkant van de stoel tussen de rupsbanden.



8. Trek de rupsband naar achteren en trek de dwarsstang naar u toe en sluit de veerklemmen. Zorg dat ze weer vergrendelen door naar beneden te duwen op het rupsbandsysteem.



9. Eenmaal in het trappenhuis kunnen hobbels, stroken of trapbeschermers worden overbrugd door uw voet op de stang te plaatsen zoals afgebeeld.



10. De handen dienen nu te worden geplaatst bovenaan de handgreep; kantel de stoel naar achteren en manoeuvreer over de rand van de trap.



11. Zorg dat de rupsbanden in contact blijven met de trap, zorg voor een stevige grip en een neerwaartse druk op de handgreep. Zo kan de stoel naar beneden bediend worden.



12. Zodra u een overloop bereikt, bedient u de stoel weer met 4 wielen en manoeuvreert u de stoel naar de volgende trap.

TERUG NAAR DE OPBERGSTAND



1. Zorg dat de voetrem vergrendeld is.



2. Ontgrendel de veerklemmen op de rupsband, dan sluiten en vergrendelen.



3. Ontgrendel de veerklemmen op de handgreep, schuif naar beneden, sluit de klemmen en haal omhoog om te vergrendelen.



4. Klap de armleningen terug. Sluit de stoel en maak de veiligheidsgordel vast.



5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en doe de beschermhoes er weer op.

Transportstoel

Instructies voor gebruik:

Waarschuwing - de stoel is ontworpen voor het vervoeren van personen. De stoel mag tijdens gebruik nooit onbeheerd worden achtergelaten want de stoel kan teruggliden en de inzittende verwonden. Het advies is dat alle gebruikers van de stoel een cursus hebben gehad. Minimaal twee mensen moeten de stoel kunnen gebruiken.



1. Haal de stoel uit de opberghoes en plaats op de grond in een geschikte stand.



2. Maak de beveiligingsgordel los en verwijder deze.



3. Houd het achterframe en het stoelframe vast.



4. Til het stoelframe op en plaats de stang van de stoel in de beugel op het achterframe.



5. Houd de handgreep vast en plaats de persoon op de zitplaats, en zorg ervoor dat de stoel ondersteund wordt.



6. Maak de veiligheidsgordel vast en loop in de verplichte looprichting.



7. Eenmaal bij de trap dient 1 persoon de handgrepen aan de achterkant van de stoel vast te houden en 1 of 2 personen dienen de hefgrepen onderaan de stoel vast te houden.



8. 1 persoon dient de leiding te nemen en instructies te geven voor het optillen. Manoeuvreer de stoel langzaam maar zeker naar beneden.



9. Eenmaal aanbeland op de overloop dient u de stoel te laten zakken in een statische stand en zich voor te bereiden op de volgende trap.



10. Eenmaal aangekomen op de begane grond evacueert u naar de uitgang.

TERUG NAAR DE OPBERGSTAND



1. Houd het achterframe en de achterkant van het stoelframe vast.



2. Maak los van de beugel en laat naar de grond zakken.



3. Bevestig veiligheids gordel rondom de stoel en breng de stoel naar de opberglocatie.



4. Klap de armleuningen terug. Sluit de stoel en maak de veiligheids gordel vast.



5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en doe de beschermhoes er weer op.



5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en doe de beschermhoes er weer op.

Premium Evacuslider

Waarschuwing - het evacuatiematras is ontworpen voor het vervoeren van personen. Het matras mag nooit onbeheerd worden achtergelaten. Het advies is dat alle gebruikers van het evacuatiematras een cursus hebben gehad. Minimaal twee mensen moeten het matras kunnen gebruiken.



	Premium evacuslider
Ingeklapt in cm	
Hoogte	75
Breedte	67
Dikte	25
Uitgeklapt in cm	
Hoogte	195
Breedte	65
Dikte	50
Meer specificaties	
Gewicht matras kg	5.5
Maximale draaglast kg	120

Instructies voor gebruik Premium Evacuslider:

1. Haal de Evacuslider uit de opbergzak.
2. Leg op de grond, rol uit en bevestig de riemen met snelsluiting (wanneer u de Premium Evacuslider gebruikt, beweeg dan de riem in een geschikte stand).
3. Gebruikt u de Premium of de Excel Evacuslider, plaats dan de hoofdsteun.
4. Gebruikt u de Premium Evacuslider, plaats dan de voetzak op de klittenbandstrip.
5. Plaats de evacu e op de Evacuslider.
6. Bevestig alle riemen om er zeker van te zijn dat de evacu e veilig is bevestigd op de Evacuslider.
7. Gebruikt u de Premium of de Excel Evacuslider zorg er dan voor dat het hoofd van de evacu e in de korte stand is bevestigd.
8. Eenmaal bij de trap dient 1 persoon de handgreep aan de achterkant van de Evacuslider vast te houden en 1 persoon dient de handgreep aan de voorkant van de Evacuslider vast te houden. De persoon aan de achterkant van de Evacuslider dient de leiding te nemen en instructies te geven voor het manoeuvreren. Manoeuveer de Evacuslider langzaam maar zeker over de trap naar beneden.
9. Eenmaal aanbeland op de overloop dient u de Evacuslider te laten zakken in een statische stand en zich voor te bereiden op de volgende trap. Eenmaal aangekomen op de begane grond naar de laatste uitgang evacueren.
10. Zorg ervoor dat u de evacu e voortdurend geruststelt.

	Premium Evacuslider
Hoofd- en neksteun	Verstelbaar
Veiligheidsgordels	Verstelbaar
Voetzak	Verstelbaar
Dubbele handgrepen	✔
Gewatteerde ondersteuningsmatras	✔
Robuuste ondergrond	✔
Opbergzak	✔
Haken & informatieborden	✔
Cursuspakketten beschikbaar	✔

Evacusafe™

Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen

 +31 (0)50 80 80 166

 +31 (0)50 31 17 079

 info@evacusafe.nl

 www.evacusafe.nl



Evacusafe™

Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen

☎ +31 (0)50 80 80 166

☎ +31 (0)50 31 17 079

✉ info@evacusafe.nl

🌐 www.evacusafe.nl